



Rua Anhandeara, 14, Cep: 13090-650 - Campinas - SP
Fones(19) 3252 1800 - 3252 1184
Fax: (19) 3294 3255
Celulares (19) 9606 5305 / (19) 9183 4120
Aviça avicultura integral e patologia animal

técnica para suabe de fundo de caixa

material:

- Frascos com BPW (Água Peptonada Tamponada);
- Suabes (cotonetes) na quantidade de caixas a serem analisadas.

método :

Cada cotonete é "passado" em uma caixa em todas as divisões, principalmente onde tiver mecônio (primeiras fezes). O passo seguinte é colocar o cotonete no frasco de BPW (máximo 50 cotonetes por frasco), lembrando de quebrar o cotonete e só colocar dentro do frasco a parte que entrou em contato com a caixa, e desprezar a parte que estava em contato com a pessoa que coletou. De preferência usar luvas.

Repetir a operação usando sempre o mesmo frasco para receber os cotonetes "sujos". Este caldo é que vai ser analisado para pesquisar a presença de Salmonela.

Abrir sempre a embalagem com o suabe pelo lado que está o cabo. As pontas dos suabes devem ser preservadas.

Após os procedimentos anteriores fechar ou vedar o frasco identificando-o de maneira que não derrame durante o transporte; colocar em caixa de isopor e mandar sob refrigeração (2 a 8° C) para o laboratório.

