



Rua Anhandeara, 14, Cep: 13090-650 - Campinas - SP  
Fones(19) 3252 1800 - 3252 1184  
Fax: (19) 3294 3255  
Celulares (19) 9606 5305 / (19) 9183 4120

**Aviária avicultura integral e patologia animal**

técnica de suabe de arrasto

**Material**

- . Suabe estéril apropriado : 02 gazes 10 x 12 cm amarradas a um cordão em Y;
- . Água Peptonada Tamponada (BPW);
- . Luvas cirúrgicas.

**Método**

Abrir a embalagem contendo o suabe de arrasto, utilizando luvas cirúrgicas descartáveis, dentro do galpão a ser amostrado. Segurando pelo cordão, iniciar o arrasto, colocando o suabe em contato direto com a cama do aviário. Andar pelo galpão arrastando as duas gazes durante 20 a 30 minutos. Período médio suficiente para amostrar metade de um galpão padrão (100 a 120 metros de comprimento), caminhando no mínimo 2 vezes do centro até a extremidade.

É aconselhável repetir o procedimento na outra metade do galpão.

Após o término, colocar o suabe no interior do frasco contendo meio para transporte (BPW), fechar o frasco, identificá-lo e manter resfriado até que seja entregue no laboratório para análise.

